

MCI-KlickFiX^{0.40}



DIE SELBSTREGULIERENDE SPANGE für ALLE

12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm



Einfache Handhabung | 5 min. Minimaler Zeitaufwand | Starke Wirkung

Wissenschaftlich optimierte Biegungen | Medizinprodukt | Günstig

Einteilige Nagelkorrektur-Spange

Spangenstärke (Ø inmm) 0.40

ohne U-Schlaufe

Verfügbare Spangenbreiten in mm

12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22

Einfache + schnelle Handhabung

geeignet für ALLE Anwender

Ohne Seminar

Kostengünstig + effizient

Eigendynamik

Selbstregulierend durch wissenschaftlich optimierte Biegungen



Zum Anlegen der KlickFiX benötigen Sie lediglich eine

- MCI - Haltezange
- ggf. noch eine MCI - Biegezange

zum Tamponieren | MCI - Tamponierer + Tamponade
zum Fixieren | Unguisan + BlueLightLED


Vorgehensweise | Reihenfolge

Beginnen Sie immer auf der „gesunden“ Seite des Nagels

VIDEO

unter www.spange-mci.de

Klick-FiX | Video

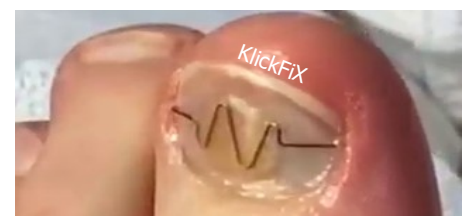

Die MCI KlickFiX-Spange ist eine selbstregulierende einteilige Orthonyxie-Spange zur Behandlung des eingewachsenen Nagels (Unguis incarnatus) sowie des Rollnagels (Unguis convolutus). Ihre wissenschaftlich optimierten Präzisions-Biegungen bewirken nach dem korrekten Applizieren eine Eigendynamik zur Begradigung des Nagels. Sie benötigen also keine U-Schlaufe. Die KlickFiX besteht aus Federstahldraht und ist als Medizinprodukt (Klasse 1) förderfähig. Einen Kostenvoranschlag zur Beantragung der Kostenübernahme durch die Krankenkasse finden Sie auf www.spange-mci.de unter der Rubrik ‚Wissbegierig‘.



① Nehmen Sie den Spangen-Schenkel, den Sie später auf der betroffenen Seite des Nagels setzen wollen, mit der MCI - Haltezange bis zur ersten Biegung auf.



② Somit ist der Spangen-Schenkel, den Sie auf der nicht entzündeten Seite des Nagels setzen wollen, frei zum Arretieren.



③ Ziehen Sie nun das Häkchen des Spangen-Schenkels behutsam unter die nicht entzündete Seite des Nagels.

Anstelle des Ziehens können Sie das Häkchen auch Eindrehen. Setzen Sie dazu das Häkchen - parallel zum Nagelfalz - in etwa mittig an der Nagel-Seite an. Drücken Sie das Häkchen nun unter den Nagel und richten Sie es zur Nagelmittle aus. Damit die KlickFIX nach dem Lösen der Haltezange nicht abfällt, legen Sie Ihren Daumen leicht auf den gesetzten Schenkel.



④ Nehmen Sie nun erneut die freie Schenkel-Seite der KlickFIX mit der MCI - Haltezange auf. Fassen Sie den Schenkel kurz vor dem Häkchen. Ziehen Sie den noch freien Schenkel der KlickFIX mit der MCI - Haltezange zur anderen Nagelseite herüber.

Der Zug generiert die für die Eigendynamik notwendige Spannung.

⑤ Ziehen Sie nun das Häkchen dieses Schenkels mit der MCI - Haltezange behutsam unter den Nagel. Setzen Sie dazu am besten an der vorderen Nagelkante an.

Falls dass nicht möglich sein sollte, können Sie diesen Schenkel auch vorsichtig an anderer Stelle dieser Nagelseite durch leichte Druckausübung „einklicken“.



Falls sinnvoll, richten Sie eines oder beide Häkchen durch Verschieben im Nagelfalz mit Hilfe der MCI - Haltezange aus. Setzen Sie dazu kurz vor dem Häkchen an - ohne Abbildung (vgl. ④)

⑥ Sofort nach dem Lösen der MCI - Haltezange hält die KlickFIX durch ihre eigendynamische Spannung.



⑦ Zur Fixierung versiegeln Sie die Biegungen der KlickFIX mit Unguisan Gel.



⑧ Härten Sie nun das Gel mit der Blue-Light LED-Lampe aus.



⑨⑩ Anschließend tamponieren Sie den Nagel noch mit dem MCI - Tamponierer und entsprechendem Tamponadematerial.

Zum Schluss ölen Sie noch den gesamten Nagel, insbes. die beiden Nagelfalze, ein.



Video unter

www.spange-mci.de



In vier bis sechs Wochen wiederholen.

